



## Chauffeurskoffer Internationaal

In steeds meer Europese landen is het verplicht om een verbandset in de auto te hebben. Deze set voldoet aan de Europese richtlijnen.

Met deze universele verbandset bent u altijd voorzien van al het noodzakelijke materiaal wanneer u onderweg problemen krijgt.

Ook voor mensen die geen eerstehulpopleiding hebben gevolgd is deze set goed te gebruiken voor het verzorgen van kleine verwondingen.

Artikelnr.: 600.VK0026



# Chauffeurskoffer Internationaal

		Inhoud	Content
1 x	600.VM.S008006	Snelverband #1 EU 8 x 6 cm	Emergency dressing #1 EU 8 x 6 cm
2 x	600.VM.S010008	Snelverband #2 EU 10 x 8 cm	Emergency dressing #2 EU 10 x 8 cm
1 x	600.VM.S012010	Snelverband #3 EU 12 x 10 cm	Emergency dressing #3 EU 12 x 10 cm
3 x 2	600.GZ.K010010D	Hydrofiel gaas 10 x 10 cm	Hydrophilic mesh 10 x 10 cm
2 x	600.WN.F006004	Elastisch Fixatiewindsel 6 cm	Elastic fixation bandage 6 cm
3 x	600.WN.F008004	Elastisch Fixatiewindsel 8 cm	Elastic fixation bandage 8 cm
1 x	600.TX.K5M025	Rol kleefpleister 5 m x 2,5 cm	Roll of adhesive plaster 5 m x 2,5 cm
1 x	600.TX.990014	Verband / Pleister assortiment	Bandage / plaster assortment
1 x	600.ST.1030	Verbandschaar	First aid scissors
1 x	600.MX.5100	Reddingsdeken	Rescue blanket
2 x	600.MX.8400	Paar handschoenen	Pair of gloves
1 x	600.MX.5150	Driekante doek	Triangular cloth
1 x	600.GZ.D080060	Steriele verbanddoek 60 x 80 cm	Sterile bandage cloth 60 x 80 cm
2 x	600.F134	Ontsmettingsdoekje	Disinfectant wipe
2 x	600.MX.7000.2	Mondmasker Type IIR	Protective mask Type IIR



# HANDELINGEN EERSTE HULP



## Belangrijke regels bij Eerste Hulp:

1. Let op gevaar.
2. Ga na wat er is gebeurd en daarna wat iemand mankeert.
3. Stel het slachtoffer gerust en zorg voor beschu ng.
4. Zorg voor professionele hulp.
5. Help het slachtoffer op de plaats waar hij of zij ligt.

## Alarmeren (112)

- Vermeld bij het alarmeren:
- welke hulpdienst nodig is
  - wat er is gebeurd
  - waar het is gebeurd
  - hoeveel slachtoffers er zijn
  - wat de slachtoffers mankeren

**Bij letsel aan armen of benen zo mogelijk sieraden (laten) afdoen in verband met a nellen door zwelling.**

<b>Braken bij bewusteloosheid.</b>	<b>Draai een op de rug liggend slachtoffer op de zij.</b>
<b>Iemand verslikt zich.</b>	<b>Sla 5x tussen de schouderbladen.</b> Sla met de vlakke hand. Ondersteun de borstkas met de andere hand.
<b>Er stroomt veel bloed uit een wond.</b>	<b>Stop het bloeden.</b> Druk de wond dicht. Leg zo mogelijk eerst een verband of schone handdoek op de wond.
<b>Er zijn brandwonden.</b>	<b>Koel gedurende minstens 10 minuten.</b> Laat rustig lauwwarm water over de verbrande plek lopen.
<b>Er is een wond (weinig bloed).</b>	<b>Spoel de wond schoon met water.</b> Dek de wond zo schoon mogelijk af. Gebruik wondpleister, steriel gaasje en kleefpleister of een wondsnelverband.
<b>Er is een schaafwond.</b>	<b>Spoel de wond met schoon water.</b> Dek de wond alleen af als dit nodig is, bijv. i.v.m. kleding. Gebruik wondpleister of gaas, bij voorkeur niet-verklevend.
<b>Lichaamsdeel doet pijn en kan niet gebruikt worden. (ontwrichting/botbreuk)</b>	<b>Voorkom beweging.</b> Slachtoffer zelf een gebroken arm laten ondersteunen. Ondersteun een gebroken been over de hele lengte inclusief voet.
<b>Lichaamsdeel doet pijn maar kan nog wel bewogen worden. (Kneuzing/verstuiking)</b>	<b>Koel 10 tot 15 minuten.</b> Liefst met een zak met water en ijs, koud kraanwater, een nat washandje of een coldpack. Geef steun en leg het lichaamsdeel zo mogelijk hoog.
<b>U hebt gebruik gemaakt van deze verbanddoos.</b>	<b>Vul de materialen snel aan.</b> Ga naar uw leverancier.



Bewaar deze handleiding in de koffer

HET ORANJE KRUIS